


DECIFERA



Effectieve wondzorg,
mét een goed gevoel!

Decifera: effectieve producten met hoog draagcomfort. Onze bijdrage aan een goed gevoel van uw cliënt!

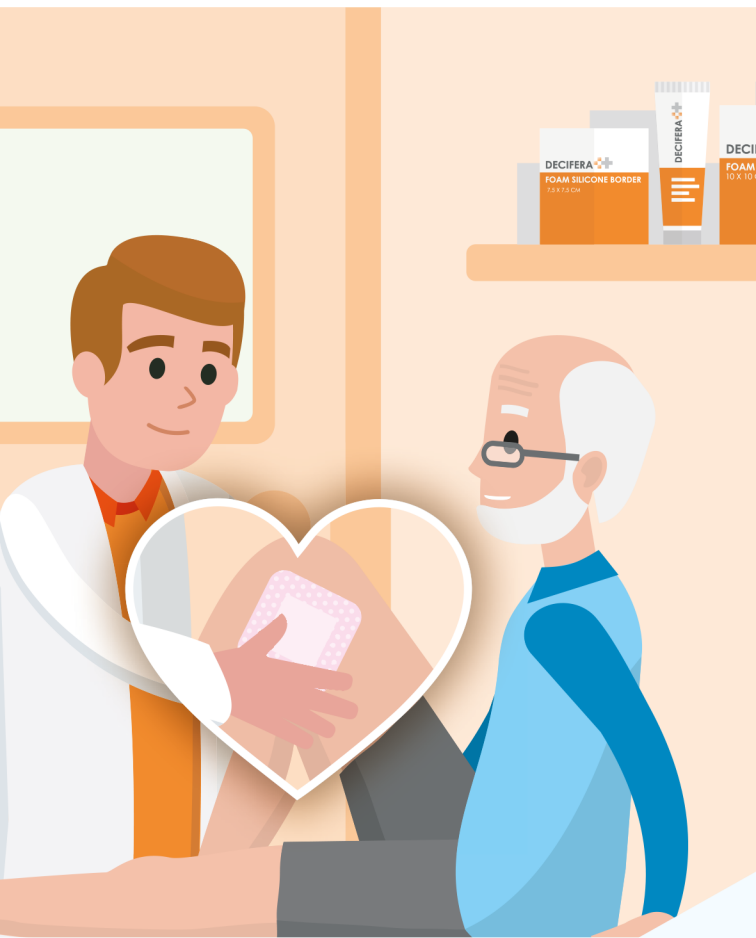

Een goed gevoel

“Iedere dag sta je voor verschillende uitdagingen in wondzorg. Geen mens is hetzelfde en geen wond is gelijk. Wondzorg is heel divers. Het is mensenwerk, waarbij jouw kennis en ervaring een centrale rol speelt!

De producten die je daarbij ondersteunen, daar moet je op kunnen bouwen. Dat begrijpen wij. Mijn verpleegkundige achtergrond en de input van onze eigen Verpleegkundig Adviseurs nemen we mee bij de ontwikkeling van het Decifera-assortiment. Met producten van hoge kwaliteit voor effectieve wondzorg, passend bij de praktijk. We zorgen voor een vast laag prijsniveau, omdat wij het belangrijk vinden dat de zorg betaalbaar blijft. Verspilling gaan we tegen door onze keuze voor kleinverpakkingen. Zo zorgen we ook voor generaties na ons. En we leveren meer dan alleen producten, we staan voor je klaar. Wat heb jij nodig om goede wondzorg te leveren? Laat het ons weten. Dat geeft ons een goed gevoel, jou ook?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Lees meer over ons assortiment of neem contact met ons op!”

Moniek Schatorjé-Timmermans |
Product Manager Wondzorg

Effectieve wondzorg...



Effectiviteit

Ondersteunt de wondgenezing door het creëren van een vochtig wondmilieu



Hoogwaardige kwaliteit

Voor prettig draagcomfort voor de gebruiker.



Verantwoord prijsniveau

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Kiezen tussen kwaliteit en kosten is verleden tijd.



Duurzaam

Voorkomen van verspilling door kleine verpakkingseenheden. Met onze betaalbare prijzen houden we de zorgkosten laag. Dat geeft een goed gevoel!



Meer dan een assortiment

Wij denken in oplossingen, niet alleen voor wonden maar in WONDZORG. We helpen je graag jouw cliënt centraal te stellen.

... én een goed gevoel!

Decifera Alginate Dressing

Wat is Decifera Alginate Dressing?

Een sterk absorberend wondverband dat bestaat uit calciumalginaat met carboxymethylcellulose (CMC).



Hoe werkt Decifera Alginate Dressing?

Bij contact met wondexsudaat ontstaat een vormvast gellerend wondverband. Dit draagt bij aan een vochtig wondmilieu dat de wondgenezing ondersteunt. Door de opname van wondexsudaat en debris heeft het verband een reinigend effect.

Wanneer kies ik voor Decifera Alginate Dressing?

Bij de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden. Ook in te zetten bij geïnfecteerde wonden.



Gebruiksgemak door kwaliteit


"In de praktijk hoor ik nog wel eens dat een alginaatverband moeilijk te verwijderen is uit de wond, doordat het niet zijn vorm behoudt. Met Decifera Alginate Dressing is dit verleden tijd! Dit product houdt zijn vormvaste structuur. Gebruiksvriendelijk voor jou en minder pijnlijk voor jouw cliënt!"

Yvonne Prein | Verpleegkundig Adviseur

Decifera Foam

Wat is Decifera Foam?

Een niet verklevend, sterk absorberend schuimverband.

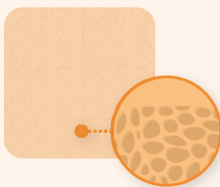

Hoe werkt Decifera Foam?

Door de poreuze structuur kan het verband optimaal wondexsudaat opnemen. De PU-filmlaag op de achterzijde van het verband zorgt voor een ademend effect. Het voorkomt het indringen van bacteriën en huidirritatie. Daardoor biedt Decifera Foam een hoog draagcomfort voor de cliënt. Daarnaast draagt het bij aan een vochtig wondmilieu doordat het overtollig wondexsudaat opneemt.


Wanneer kies ik voor Decifera Foam?

Voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.

Decifera Foam Silicone (border)

Wat is Decifera Foam Silicone (border)?

Een niet verklevend, sterk absorberend schuimverband met een siliconen wondcontactlaag.

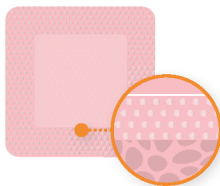

Hoe werkt Decifera Foam Silicone (border)?

Decifera Foam Silicone (border) beschikt over een geïntegreerde siliconen wondcontactlaag. Deze voorkomt verkleving van de wond aan het verband. Daarnaast draagt het bij aan een vochtig wondmilieu doordat het overtollig wondexsudaat opneemt.

Wanneer kies ik voor Decifera Foam Silicone (border)?

Licht exsuderende wonden - Decifera foam silicone border extra thin

Matig exsuderende wonden - Decifera foam silicone (border)

★ Effectiviteit


Zo min mogelijk verbandwisselingen. Dat kan alleen bij goed exsudaatmanagement, waarbij een hoge opnamecapaciteit een rol kan spelen. Met Decifera Foam Silicone heb je beschikking over een product dat bijdraagt aan het genezingsproces en waarbij het aantal verbandwisselingen minimaal is. Prettig voor jou en jouw cliënt!



Decifera Silicone Sheet

Wat is Decifera Silicone Sheet?

Een siliconen wondcontactlaag met een zachte, huidvriendelijke en poreuze structuur.

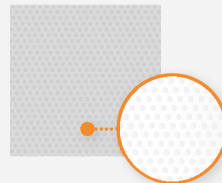

Hoe werkt Decifera Silicone Sheet?

Door de poreuze structuur en juiste perforatiegrootte kan wondexsudaat optimaal worden opgenomen in het secundaire wondverband. Dit vermindert de kans op maceratie van de wondranden. De siliconen wondcontactlaag voorkomt verkleving van het verband aan het wondbed. Nieuw gevormd weefsel wordt zo beschermd. En jouw cliënt heeft geen pijn als je het verband verwisselt.

Wanneer kies ik voor Decifera Silicone Sheet?

Bij de behandeling van licht tot sterk exsuderende wonden.

Wist je dat?

De border van Decifera Foam Silicone border precies de juiste dikte heeft? Hierdoor is herplakken van de border of verwijderen van plooiën, wanneer dit nodig is, heel gemakkelijk!

★ Draagcomfort

Wij begrijpen dat een (complexe) wond een grote impact heeft en erg belastend kan zijn voor jouw cliënt. Daarom doen we geen concessies op het draagcomfort van onze producten.

Dat zie je terug bij alle producten van Decifera. Wel zo prettig voor jouw cliënt!



Decifera Hydrogel

Wat is Decifera Hydrogel?

Een wondgel bestaande uit water en bindmiddelen.

Hoe werkt Decifera Hydrogel?

De gel absorbeert kleine hoeveelheden wondexsudaat. Door de compacte structuur blijft de gel goed in de wond zitten. Hierdoor heeft de gel een effectieve werking en ondersteunt het een optimaal genezingsproces. Als je de hydrogel aanbrengt op necrotisch weefsel, stimuleert het een autolytisch debridement.

Wanneer kies ik voor Decifera Hydrogel?

Bij de behandeling van droge wonden of necrotisch weefsel.



Kwaliteit voor effectiviteit en gebruiksgemak

"We doen er alles aan om de hoge kwaliteit van onze producten te bewaken. Kwaliteit is nodig in wondzorg. Voor de effectiviteit van de behandeling, maar ook voor het gebruiksgemak in de praktijk.

Onze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit.


We volgen met de productie van Decifera de nieuwste normen, wetgevingen en richtlijnen. Het beste ervar je dat natuurlijk zelf, dus vraag gerust een proefsetje aan!"

Toon van Bommel | Kwaliteitsmanager

★ Betaalbaarheid

Onze prijs-kwaliteitverhouding zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te kiezen tussen kwaliteit en budget. We houden de prijzen laag. Zo houden we samen wondzorg betaalbaar.

De zorg betaalbaar houden, ook voor generaties na ons.

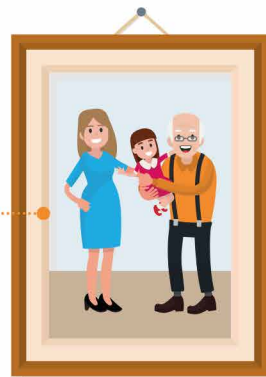

★ Kleinverpakkingen

Onze keuze voor kleinverpakkingen zorgt voor gemak in de apotheek of medisch speciaalzaak en in jouw praktijk. Je gebruikt alleen wat je nodig hebt. Zo gaan we samen verspilling tegen en bestel je producten op maat.



De cliënt centraal stellen

“ Waar ik iedere dag enthousiast van word? Gepassioneerde zorgverleners! Hoe zij het uiterste uit hun vak halen met de benodigde kennis en kunde, ondersteund met de juiste middelen.

Ik vind het mooi om te zien dat bijvoorbeeld wondverpleegkundigen net dat beetje extra doen om de cliënt te helpen. En hoe erg de cliënten dit waarderen. Dat maakt dat ik er zelf ook alles aan wil doen om de zorgverlener te helpen zijn of haar cliënt centraal te stellen.

Dus: vraag maar raak, ik help je graag!”

Sandra Wijdenes | Verpleegkundig Adviseur

Ondersteuning in wondzorg

We bieden je meer dan alleen producten. Wat heb je nodig in jouw praktijk?



Voorlichtingsmaterialen

Voor jouw cliënten en zorgcollega's, zoals brochures, presentaties of een wondprotocol.



Trainingen

Voor groepen of één-op-één door onze Verpleegkundig Adviseurs.



Advies

Assortimentsadvies of individuele casusbesprekingen.



Educatie

Nascholingen in groepsverband of online.



Op maat

Vertel ons wat je nodig hebt om succesvol te zijn, we helpen je graag!

Interesse?

Neem contact op en we gaan samen aan de slag voor jouw cliënten!

Aan de slag met Decifera?

Kijk hier voor de bestelinformatie, of bespreek het met de inkoopafdeling van jouw organisatie. Hebben zij meer informatie nodig? Laat het ons weten!

Afmeting	REF. nr.	Z-index	Verpakking
DECIFERA Alginate Dressing			
5 x 5 cm	SW0001	16397894	5 stuks
10 x 10 cm	SW0003	16397908	5 stuks
2 x 30 cm	SW0013	16397916	5 stuks
DECIFERA Hydrogel			
15 gram	SW0041	16397630	5 stuks
DECIFERA Silicone Sheet			
5 x 7,5 cm	SW0100	16397827	5 stuks
7,5 x 10 cm	SW0101	16397851	5 stuks
12 x 15 cm	SW0103	16397886	5 stuks
DECIFERA Foam			
10 x 10 cm	SW0060	16397657	5 stuks
DECIFERA Foam Silicone			
7,5 x 7,5 cm	SW0071	16397746	5 stuks
10 x 10 cm	SW0072	16397762	5 stuks
DECIFERA Foam Silicone border			
7,5 x 7,5 cm	SW0130	16397665	5 stuks
10 x 10 cm	SW0131	16397673	5 stuks
12,5 x 12,5 cm	SW0073	16397711	5 stuks
DECIFERA Foam Silicone border extra thin			
5 x 5 cm	SW0025	16933168	5 stuks
7,5 x 7,5 cm	SW0026	16933176	5 stuks
10 x 10 cm	SW0027	16933184	5 stuks

Meer weten?

Bekijk ons gehele assortiment op **decifera.nl**.
Of neem contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag verder.



Omdat elke wond totale aandacht verdient

VAN HEEK MEDICAL 

Onderdeel van Mosadex Groep

Macroweg 10 | 5804 CL Venray | T +31 88 220 88 22

E info@vanheek.com | www.vanheek.com