

# Attends® Adjustable




## Gebruiksaanwijzing

Attends Adjustable stelt u in staat te beslissen wat de beste manier is om het product aan te passen op de behoeften van de gebruiker. De onderstaande 3 manieren van aanbrengen kunnen ook worden toegepast bij gebruikers in zittende of liggende positie.


### Vorbereiding

1

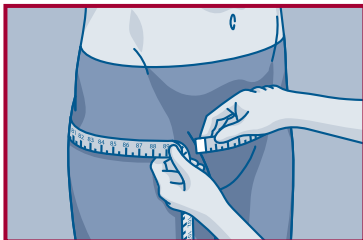


Meet met een meetlint de heup- en/of tailleomvang om zo aan de hand van de grootste omtrek de juiste maat te kiezen.

2

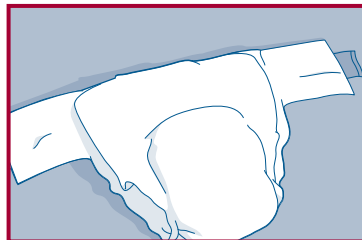

Open het product volledig en leg deze op de achterzijde met de heupbanden aan de achterkant. Zorg ervoor dat de heupbanden volledig zijn opengevouwen.


3

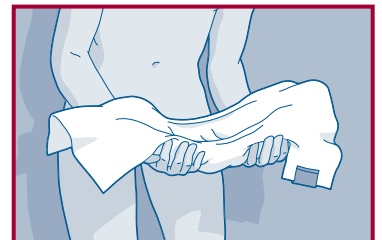

Strek en vouw de inlegger van de Adjustable voorzichtig in een bootvorm over de volledige lengte zodat de anti-lek randjes overeind staan. De anti-lek randjes vormen zich vanzelf met de natuurlijke pasvorm van de inlegger.

### Fixatie - Optie A

4

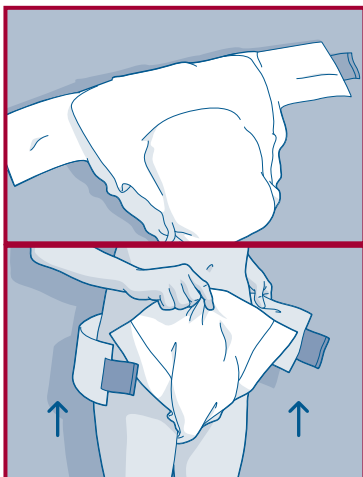


Laat de fixatietape open aan beide kanten.

Plaats de inlegger tussen de benen zodat deze goed en comfortabel aansluit op het lichaam en in de liesstreek. Gebruik de vochtindicator om te helpen bij het positioneren en centreren van de inlegger.

### Fixatie - Optie B

4

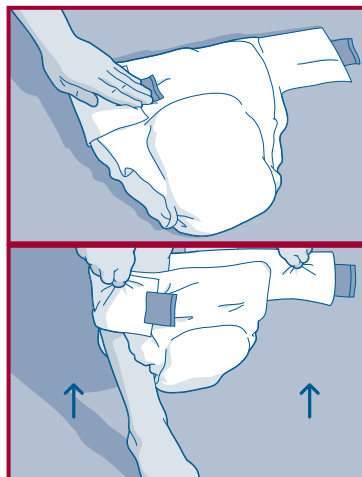


Bevestig de fixatietape aan een zijde alvorens het product aan te trekken.

Stap met één been in het product en trek de Adjustable zodanig omhoog dat het comfortabel rust in de liesstreek en/of rondom het been. Gebruik de vocht indicator om te helpen bij het positioneren en centreren van de inlegger.

### Fixatie - Optie C

4

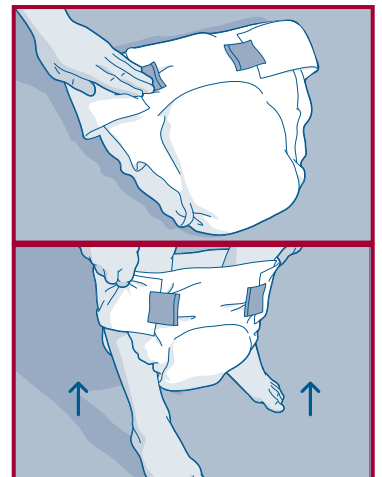

Bevestig beide fixatietapes losjes aan de voorzijde van de Adjustable.

Stap in de Adjustable alsof het normaal ondergoed is (of zoals bij de Attends Pull-Ons) en trek deze omhoog tegen het lichaam en liesstreek. Gebruik de vochtindicator om het product te centreren.

Wilt u meer informatie? Bezoek: [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [www.attends.be](http://www.attends.be)


## Fixatie - Verder ...

5




Trek de heupbanden voorzichtig naar de voorzijde van de Adjustable toe. De fixatietapes kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst op de voorzijde. Druk de tape stevig op de inlegger zodat de Adjustable veilig op zijn plaats blijft.

6

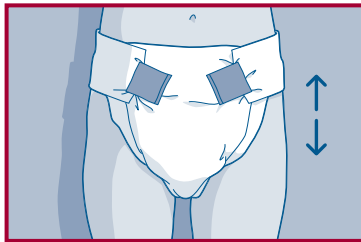

De fixatietapes kunnen worden aangepast aan de individuele gewenste pasvorm van de gebruiker en kunnen indien gewenst opnieuw worden geopend en herbevestigd.

7

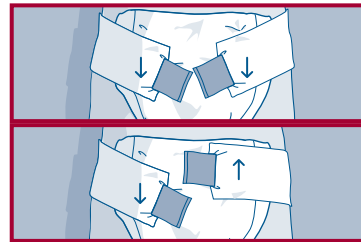

U kunt de fixatietapes op verschillende manieren plaatsen, om de beste pasvorm te krijgen.

## Hints en Tips

### Product keuze

- Meet heup- en middelomvang en neem de grootste maat van beiden om de juiste maat te kiezen.

### Bij doorlekken

- Controleer nogmaals of u de juiste maat hebt gekozen.
- Controleer nogmaals of het product juist is aangebracht.

### Verwijderen

- Rol de Adjustable na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de Adjustable na gebruik nooit door het toilet.

### Gebruik

- Vouw de inlegger in de lengte en maak er voorzichtig een bootvorm van.
- Verzeker u ervan dat de buitenzijde van de beenopening naar buiten gevouwen zijn.
- Verzeker u ervan dat u altijd weet wat de voor- en achterzijde is alvorens het product aan te trekken.
- Gebruik de vochtindicator als hulpmiddel om het product te centreren.
- U kunt de fixatietapes bevestigen op elke gewenste positie op de voorzijde. Eenmaal bevestigd drukt u de fixatietapes stevig vast voor een veilige bevestiging.
- U kunt de fixatietapes bevestigen en herbevestigen totdat de Adjustable optimaal aansluit op de contouren van het lichaam.

### Vervangen

- Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer dan de helft (60%) vervaagd is dan is de Adjustable verzadigd en dient te worden vervangen.
- U kunt het product hergebruiken indien deze schoon en droog is bij een toiletgang.
- Voorkom dat u de fixatietapes op de huid plakt.
- Verwijder verzadigde producten via de achterzijde indien mogelijk.
- Verschoon en verzorg de huid volgens voorschrift, bij voorkeur van voor naar achteren.
- Gebruik de Adjustable niet in combinatie met zalf, olie of poeder omdat deze de absorptiecapaciteit negatief beïnvloeden. Zodoende wordt urine niet volledig opgenomen waardoor de huid mogelijk geïrriteerd en beschadigd raakt.

**Attends® Adjustable**



Attends Adjustable is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [www.attends.be](http://www.attends.be)