


Attends Adjustable



Het is heel belangrijk om te kiezen voor de juiste maat zodat het product goed aansluit op het lichaam. Dit biedt de beste bescherming tegen doorlekken. Meet daarom de maat van heup en middel. De grootste maat van beiden is bepalend voor het kiezen van de juiste maat.

Zie onderstaande tabel voor beschikbare maten en verpakkingseenheden of raadpleeg de **Attends Adjustable Factsheet** voor meer informatie.

		Heupmaat (cm)	Verpakkingseenheid	Doosinhoud	Artikelcode Zak	Z-index Code
10	Attends Adjustable M 	80 - 110	21	84	206447	16736435
	Attends Adjustable L 	100 - 140	21	84	206461	16736443




Attends Adjustable is getest en goedgekeurd door **proDERM**, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

VAN HEEK MEDICAL 
Onderdeel van Mosadex Groep


 **+31 (0) 88 220 88 22**

 **BE www.attends.be
NL www.attends.nl**

 **BE info@attends.be
NL info@attends.nl**

 **BE Attends België,
Rubensstraat 104
2300 TURNHOUT**

**NL Attends Nederland,
Macroweg 10
5804CL VENRAY**

 **BE Attends Verzorging en Welzijn
NL Attends Zorg en Welzijn**



a part of Domtar Personal Care

Attends Adjustable



Verstelbare pasvorm,
voor optimale
bescherming



Juni 2020 - 55977

Attends® Adjustable



Omdat geen mens hetzelfde is

Dankzij de flexibele verstelmogelijkheden biedt **Attends Adjustable** de mogelijkheid om deze aan te passen en indien nodig nogmaals nauwkeurig bij te stellen aan de contouren van het lichaam.


Het aanpassen

Attends Adjustable maakt het mogelijk om de beste oplossing te kiezen die past bij de gebruiker. Welke manier van fixeren u ook kiest, de inlegger sluit altijd nauwkeurig aan op het lichaam dankzij de elastische heupbanden en de hersluitbare plakstrips.




Rekbare heupbanden

Attends Adjustable heeft sterke en comfortabel zachte heupbanden van elastisch materiaal. Dankzij de rekbaarheid van de banden sluiten deze nauwkeurig en discreet aan op het lichaam.

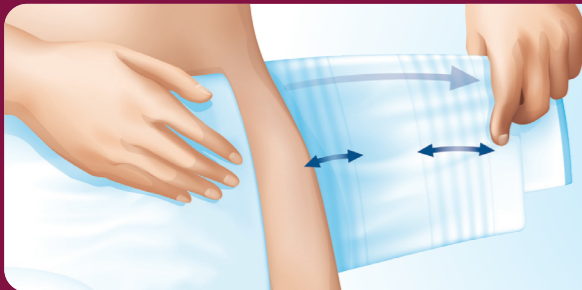

Plakstrips

De plakstrips kunnen op elke gewenste positie op de voorzijde gefixeerd worden zodat er altijd een optimale pasvorm is voor de gebruiker. Eenmaal bevestigd bieden de tapes een veilige fixatie en kunnen op elk gewenst moment weer geopend en herbevestigd worden. Raadpleeg eventueel de **Adjustable Gebruiksaanwijzing** of ons YouTube kanaal voor meer gedetailleerde instructies.

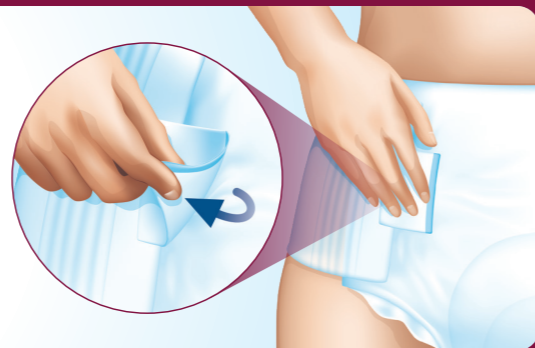

Betere kwaliteit van leven

“ Ik voel mij weer zeker en vrij ”

Gebruiksvriendelijk

“ Ik kan het product eenvoudig zelf aantrekken en vind de hersluitbare tapes geweldig omdat ik deze kan verstellen zodat het product goed en bovenal comfortabel aansluit op mijn lichaam ”

Betere bescherming tegen doorlekken

“ Ik ben erg tevreden over de Adjustable omdat ik me optimaal beschermd voel tegen ongelukjes ”

Meer comfort

“ Heel zacht en comfortabel droog tegen mijn huid ”



Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



pH waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.