



Werk veilig. Bescherm jezelf en gebruik Betica


Injectie voorbereiden

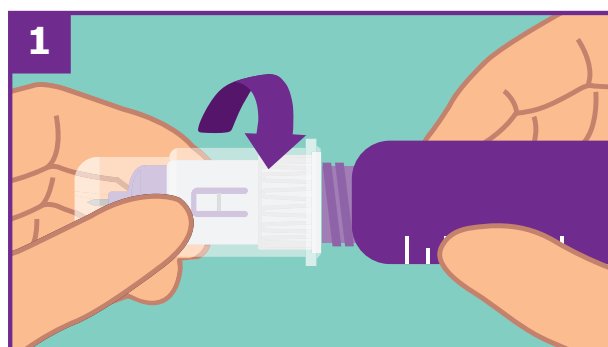

1 Bevestig de veiligheidspennaald. Draai de Betica-veiligheidspennaald in een hoek van 180° recht op de insulinepen totdat je weerstand voelt.

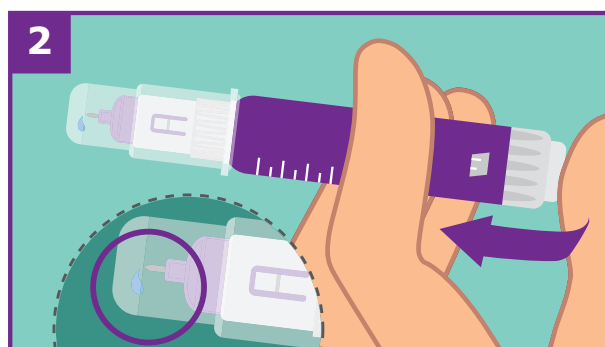


2 Ontlucht de veiligheidspennaald door twee eenheden insuline door te spuiten, totdat er zich een druppel op de naald vormt. Laat de transparante kap zitten en verwijder deze pas als je gaat injecteren.

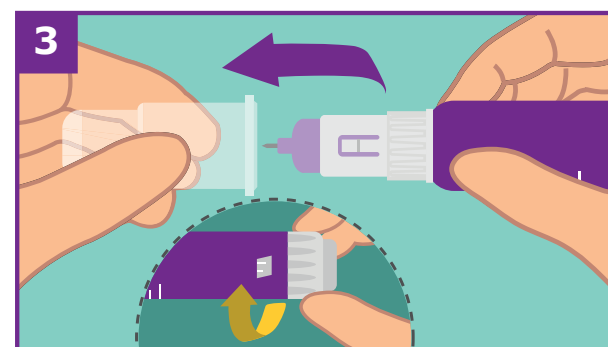


3 Stel het aantal eenheden insuline in volgens voorschrift van de behandelaar. Verwijder de transparante kap. Door de zichtbare naald bepaal je eenvoudig de juiste injectieplaats.

Injectietechniek loodrecht

Aanbevolen door de Vereniging van Diabetesverpleegkundigen bij 5 mm pennaalden.* Let bij de huidplooi op dat er voldoende ruimte is tussen de vingers.

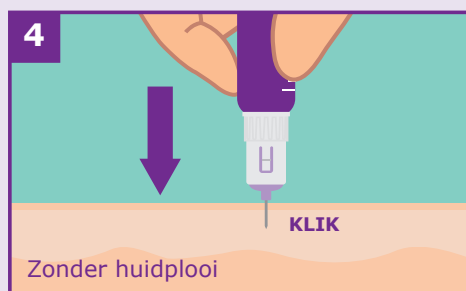

Zonder huidplooi

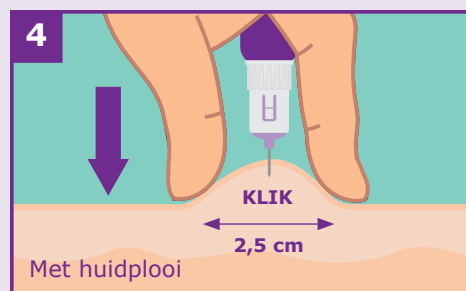


Met huidplooi 2,5 cm


*EADV-Richtlijn 2017 Het toedienen van insuline met de insulinepen, maart 2017

Injectietechniek schuin

Aanbevolen door de Vereniging van Diabetesverpleegkundigen bij 8 mm pennaalden.* Let bij de huidplooi op dat er voldoende ruimte is tussen de vingers.

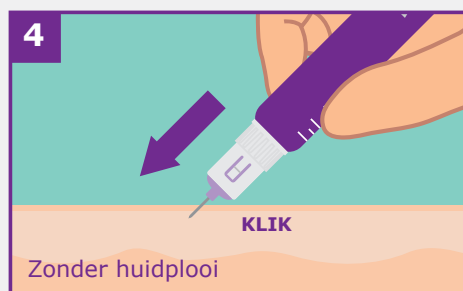

Zonder huidplooi

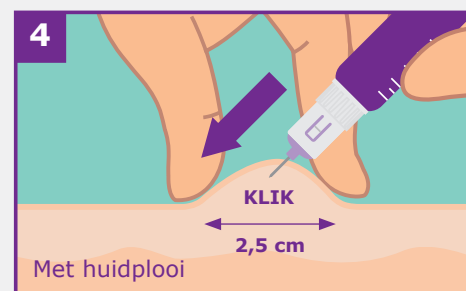

Met huidplooi 2,5 cm


*EADV-Richtlijn 2017 Het toedienen van insuline met de insulinepen, maart 2017

Wat Betica Dual Safety Pennaalden uniek maakt is dat deze te gebruiken zijn met loodrechte én schuine injectietechniek.

Het werkt zo: breng de naald met een vloeiende beweging in de huid, totdat je een KLIK hoort. Je ziet dat de gekleurde naaldbeschermers zich terugtrekt in de witte naaldhub.




Na de injectie

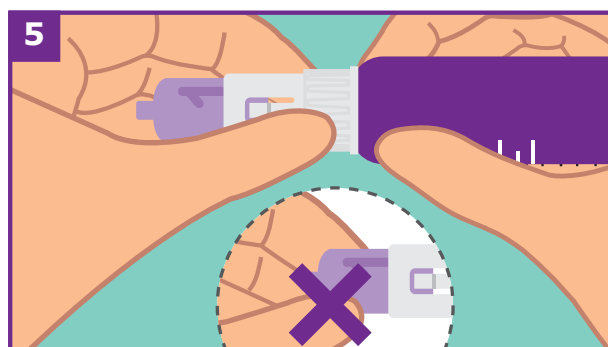

Verwijderen

Verwijder de Betica-veiligheidspennaald door deze vast te pakken bij de witte naaldhub. Draai vervolgens de veiligheidspennaald van de insulinepen door tegen de klok in te draaien.

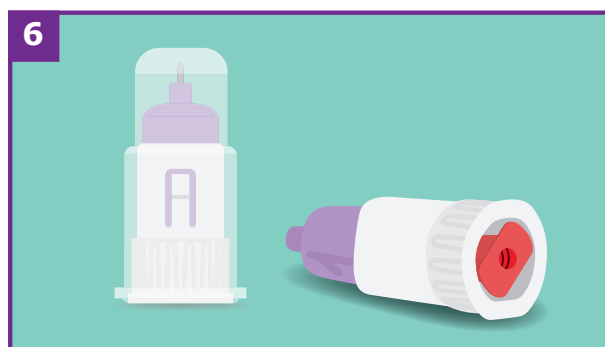

Automatische dubbele beveiliging

Na de injectie wordt de naald aan de cliëntzijde en de penzijde automatisch voorzien van een beschermende cover.



Veilig afvoeren

Voer de gebruikte Betica-veiligheidspennaald volgens voorschrift af. Wij adviseren je deze in een naaldencontainer te werpen.

Alle combinaties mogelijk

De veiligheidspennaalden van Betica zijn te gebruiken in combinatie met alle gangbare insulinepenen.

Veiligheidslancetten

Op een veilige manier een bloedmonster verkrijgen voor het bepalen van de bloedglucose? Maak gebruik van de Betica-veiligheidslancetten. Met deze veiligheidslancetten voorkom je prikaccidenten, doordat de lancetten na de prik direct worden teruggetrokken in de beschermende cover.

