

Referentienummer van jouw product: _____

Jouw notities: _____

Belang van fixeren

Gebruik je de urinezak in combinatie met een verblijfskatheter en beenzak? Dan is het van belang dat je zowel de katheter als de beenzak goed vastmaakt op je lichaam. Dit helpt beschadigingen aan de urinebuis (urethra) en blaas voorkomen.

Voorkom tractie (trekken) op de verblijfskatheter

- * Fixeer de katheter
- * Gebruik de juiste lengte slang
- * Fixeer de urinezak
- * Houd bij het fixeren rekening met bewegingsvrijheid

Jouw instructies voor het fixeren

Voor meer informatie over het assortiment en de producten kun je terecht op **hekura.nl**.




HEKURA



Gebruiksaanwijzing Meerdaagse bedzakken

Het gevoel van Hekura...
Controle. Dichtbij. Samen vooruit.

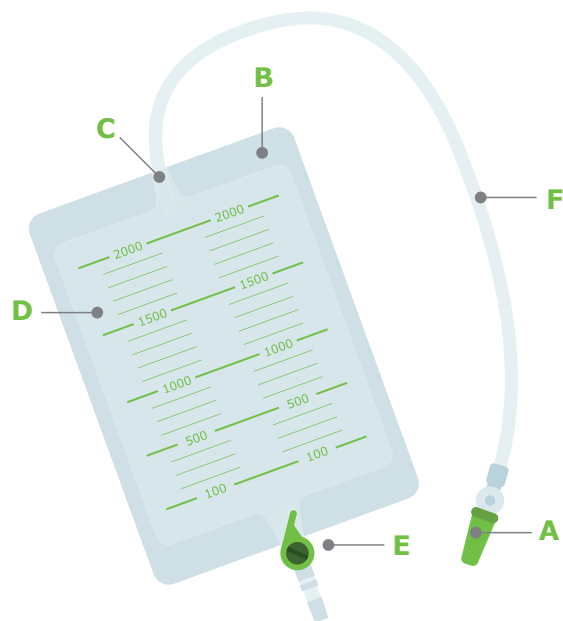

A Universele connector met beschermdop.

De geribbelde connector zorgt voor een sterke verbinding tussen de verblijfskatheter en de urinezak.

B Voorgestante bevestigingsopening.

Hieraan maak je de bedhanger vast.

C Terugslagventiel.

Dit voorkomt dat de urine terug in de slang kan lopen.

D Indicatieve maatverdeling.


Hiermee heb je inzicht in de hoeveelheid urine die je produceert.

E Kraan.

Deze zorgt ervoor dat de urinezak geleegd kan worden. Er zijn verschillende kranen. Meer informatie hierover vind je in de instructie hiernaast.

F Toevoerslang.

De toevoerslang heeft een lengte van 130 cm. Deze lengte geeft je de mogelijkheid om te draaien in bed.

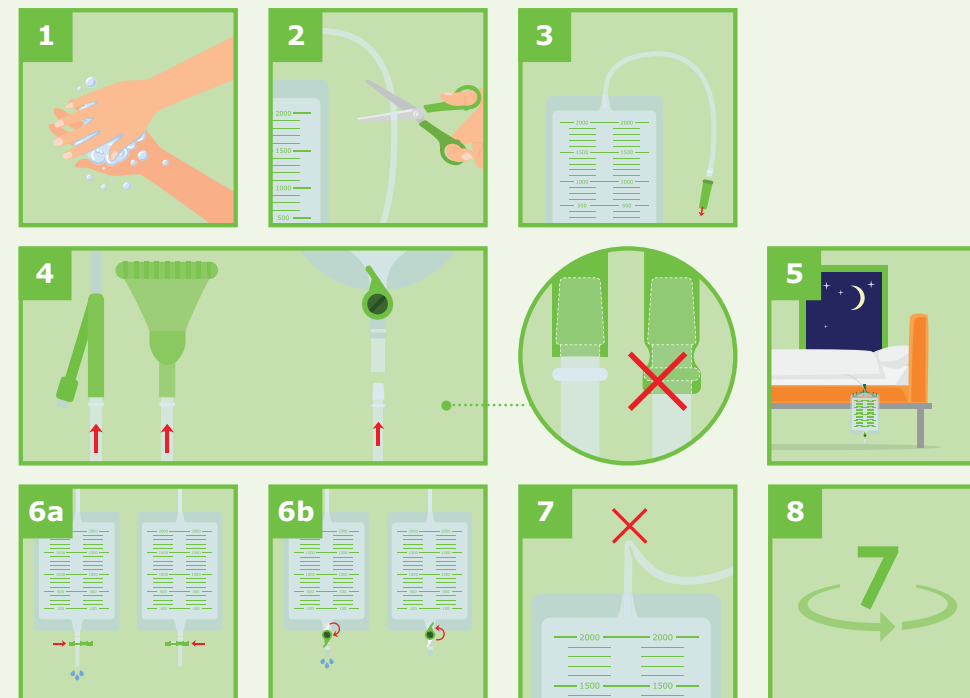

Instructie

- 1 Was je handen zorgvuldig.
- 2 Optioneel: knip de slang op de gewenste lengte en bevestig de connector stevig op de slang van de urinezak. Bestel hiervoor losse connectoren bij met nummer UZ5555-1.
- 3 Verwijder de groene beschermhuls van de connector. Zorg dat de kraan gesloten is.
- 4 Koppel de urinezak aan de katheter of aan de beenzak d.m.v. een koppelstuk. Schuif het door tot aan de achterste ribbel, ga hier niet overheen.
Bij meerdaags gebruik, in combinatie met een beenzak, de urinezak na ieder gebruik afkoppelen, spoelen (eventueel met een scheutje azijn) en laten drogen alvorens opnieuw te gebruiken.
- 5 Bevestig de urinezak met fixatiemateriaal op de gewenste plek aan het been of met een bedhaak aan het bed.
- 6 Open de kraan om de zak te legen. Reinig na leging het uiteinde van de kraan.
 - 6a Kruiskraan: Schuif de kruiskraan naar de andere kant. Voor het sluiten schuif je de kruiskraan terug totdat er een klik hoorbaar is.
 - 6b Hefboomkraan: klap de hefboomkraan omlaag. Klap de hefboomkraan omhoog om de urinezak te sluiten.
- 7 Zorg altijd voor een knikvrije slang.
- 8 Voor gebruik tot maximaal 7 dagen.



Bekijk de instructievideo op [hekura.nl](https://www.hekura.nl)