




PULL-ONS


Les Attends Pull-Ons sont des sous-vêtements absorbants doux et discrets qui ressemblent à de vrais sous-vêtements. Ces sous-vêtements jetables peuvent facilement être enfilés et enlevés et sont conçus pour gérer l'incontinence légère, modérée ou sévère.




Conseils de Pose

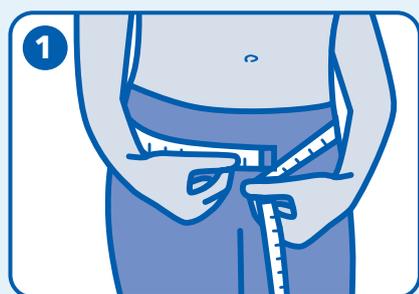


1 Pour choisir la bonne taille, mesurez votre tour de taille et votre tour de hanche. Utilisez la plus grande de ces deux mesures pour sélectionner la taille adaptée.

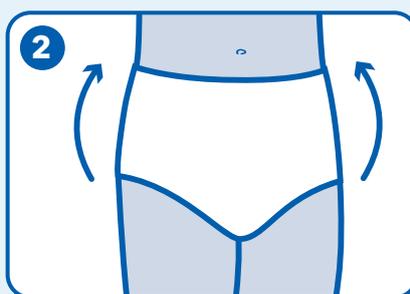


2 La protection s'enfile et s'enlève comme un sous-vêtement normal. Ceci peut être fait plusieurs fois, grâce à la conception du produit.

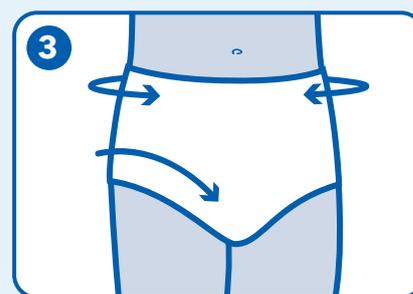

3 L'élasticité du sous-vêtement permet un ajustement confortable et sûr.

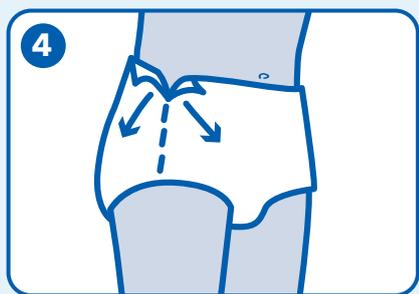

4 Lorsque la protection a besoin d'être changée, il suffit de la baisser ou de déchirer les coutures sur le côté.

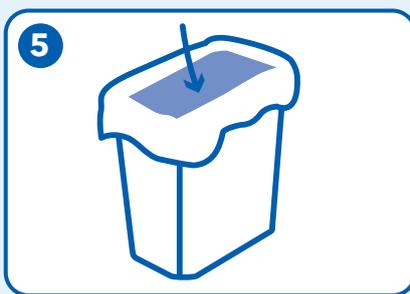

5 Enroulez ensuite la protection et jetez-la à la poubelle.

PULL-ONS

Conseils et Astuces

Choix du produit

- Choisissez la taille de Pull-On en fonction de la largeur de vos hanches et de votre tour de taille - choisir la plus grande des deux mesures.
- Choisissez le niveau d'absorption en fonction du volume des fuites urinaires. Essayez d'abord un niveau d'absorption plus faible avant de passer à un produit plus absorbant.
- Les Pull-Ons peuvent être une solution pour les patients qui enlèvent les protections anatomiques de leur culotte de maintien.

Pose

- Le liseré bleu indique l'arrière du produit.



Tolérance cutanée
approuvée
dermatologiquement
par proDERM, Institut de
Recherche Dermatologique
Appliquée

Change

- Vérifiez l'indicateur d'humidité pour contrôler le niveau de saturation: lorsque l'indicateur a disparu sur plus de la moitié de la longueur de la protection (60%), il faut la changer. Sinon, on peut la réutiliser.

Gestion du produit usagé

- Enroulez la protection et jetez-la à la poubelle.
- Ne pas jeter la protection dans les toilettes.