

Attends®

La protection incontinence pour vous




MEN 1 à 4


Attends MEN est une gamme de coquilles et protections absorbantes développées spécifiquement pour l'anatomie masculine offrant confort et un ajustement au plus près du corps. Elles sont conçues pour gérer les fuites urinaires très légères à modérées et sont disponibles en différentes formes.




Conseils de Pose

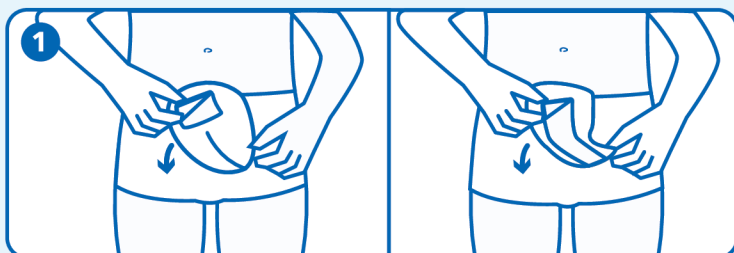

Découlez le papier protecteur de la surface adhésive à l'arrière du produit. Veillez à ce que le produit soit déplié avec la partie la plus large du produit (le cas échéant) tournée vers le haut, comme indiqué sur la bande adhésive.

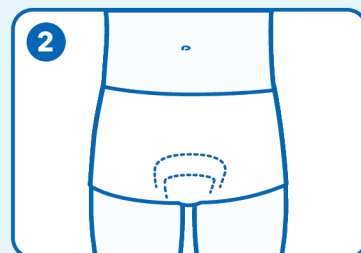

Placez le produit dans un sous-vêtement bien ajusté (les caleçons amples ne sont pas recommandés).

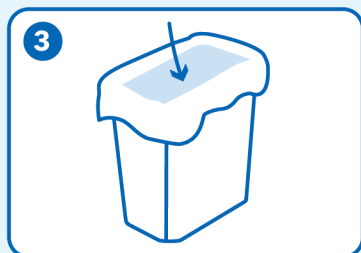

Après utilisation, enroulez la protection usagée et jetez-la à la poubelle.

Pour plus d'information, visitez notre site : www.attends.fr

Attends®

La protection incontinence pour vous

MEN 1 à 4

Conseils et Astuces

Choix du produit

- Sélectionnez le bon niveau d'absorption.
- Pour une performance optimale, nous vous recommandons de porter ces protections avec des sous-vêtements bien ajustés (éviter les caleçons).
- Choisir le niveau d'absorption le plus bas possible, permet de réduire les déchets.



Tolérance cutanée is approuvée dermatologiquement par proderm, Institut de Recherche Dermatologique Appliquée



STANDARD 100
SE 21-260
RISE

www.oeko-tex.com

Ce label certifie que les Attends For Men 1 et 2 et les Attends Men 2 et 3 sont inoffensifs pour la santé humaine.

Gestion du produit usagé

- Enroulez la protection usagée et jetez-la conformément à la politique de gestion des déchets de votre établissement.
- Lorsqu'il est fourni, vous pouvez enrouler le produit dans l'emballage individuel pour le jeter.
- Ne pas jeter le produit dans les toilettes.