

Heka Bleeding Control Kit

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Direct kunnen handelen bij een hevige bloeding en hiermee de overlevingskansen van slachtoffers van (terroristische) aanslagen of ongelukken vergroten? De Heka Bleeding Control Kit (BCK) bevat alle producten die nodig zijn om een hevige bloeding te stoppen. Daarnaast biedt de Heka Bleeding Control Kit voldoende ruimte om extra materiaal naar wens toe te voegen, zoals een hemostatisch gaas of een extra tourniquet. Ook het productlabel biedt ruimte om deze producten te noteren. Tevens bevat de achterkant van het productlabel een korte omschrijving hoe een tourniquet gebruikt moet worden.

Inhoud BCK:

- 1x C-A-T Tourniquet Oranje GEN7
- 2x5 Chirurgisch absorberend gaaskompres X-ray detectable 10 x10 cm
- 1x HEKA geperst gaas steriel
- 1x HEKA Reddingsdeken goud/zilver 160 x 210
- 1x HEKA FIX Traumazwachtel 10 x 18 cm steriel
- 1x Watervaste zwarte stift
- 2 paar HEKA handschoenen nitril maat L
- 1x handleiding gebruik Tourniquet

Omschrijving

Direct kunnen handelen bij een hevige bloeding en hiermee de overlevingskansen van slachtoffers van (terroristische) aanslagen of ongelukken vergroten? De Heka Bleeding Control Kit (BCK) bevat alle producten die nodig zijn om een hevige bloeding te stoppen.

Aditionele informatie

Artikelnummer	TR0508-1
Referentienummer	56982
Toepassing	Bescherm jezelf en trek handschoenen aan. Stop vervolgens het geperst gaas of de chirurgische absorberend gaaskompres X-ray detectable in de wond en oefen druk uit op de wond. Leg de traumazwachtel aan en plaats desgewenst de tourniquet enkele centimeters boven de wond. Indien de tourniquet aangebracht is gebruik dan de stift om de tijd van aanbrengen te noteren op de tourniquet. De Heka Reddingsdeken kan gebruikt worden om het slachtoffer te beschermen tegen onderkoeling of oververhitting.
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Heka
Inhoud verpakking	1 stuk
ZI-nummer	99956982