

# Attends Adjustable | Gebruiksaanwijzing NL-BE

## Product afbeeldingen

**Attends Adjustable**



### Gebruiksaanwijzing

Attends Adjustable stelt u in staat te beslissen wat de beste manier is om het product aan te passen op de behoeften van de gebruiker. De onderstaande 3 manieren van aanbrengen kunnen ook worden toegepast bij gebruikers in zittende of liggende positie.

#### Voorbereiding



1 Meet met een meetlint de heup- en/of tailleomvang om zo aan de hand van de grootste omtrek de juiste maat te kiezen.



2 Open het product volledig en leg deze op de achterzijde met de heupbanden aan de achterkant. Zorg ervoor dat de heupbanden volledig zijn opgevouwen.

#### Fixatie plakkers open aan beide kanten



3 Strek en vouw de inlegger van de Adjustable voorzichtig in een bootvorm over de volledige lengte zodat de anti-lek randjes overeind staan. De anti-lek randjes vormen zich vanzelf met de natuurlijke pasvorm van de inlegger.



4 Plaats de inlegger tussen de benen zodat deze goed en comfortabel aansluit op het lichaam en in de liesstreek. Gebruik de vochtindicator om te helpen bij het positioneren en centreren van de inlegger.



5 Trek de heupbanden voorzichtig naar de voorzijde van de Adjustable toe. De fixatie tapes kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst op de voorzijde. Druk de tape stevig op de inlegger zodat de Adjustable veilig op zijn plaats blijft.



6 De fixatietapes kunnen worden aangepast aan de individuele gewenste pasvorm van de gebruiker en kunnen indien gewenst opnieuw worden geopend en herbevestigd.

#### Fixatietape open aan een zijde



3 Bevestig de fixatietape aan een zijde alvorens het product aan te trekken.



4 Stap met één been in het product en trek de Adjustable zodanig omhoog dat het comfortabel rust in de liesstreek en/of rondom het been. Gebruik de vocht indicator om te helpen bij het positioneren en centreren van de inlegger.



5 Trek de andere heupband voorzichtig naar de voorzijde van de Adjustable toe. De fixatie tapes kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst op de voorzijde. Druk de tape stevig op de inlegger zodat de Adjustable veilig op zijn plaats blijft.



6 De fixatietapes kunnen worden aangepast aan de individuele gewenste pasvorm van de gebruiker en kunnen indien gewenst opnieuw worden geopend en herbevestigd.

Attends Adjustable (T1111) GalsB - 1-20176-048-04w-2016

## Korte omschrijving

---

Maximaal 1 stuk per bestelling.

## Aditionele informatie

---

Artikelnummer	55976
Referentienummer	55976
Merk	Attends
Soort	Diversen
ZI-nummer	99955976