


# Hekura gebruiksklare eenmalige katheters

## Product afbeeldingen

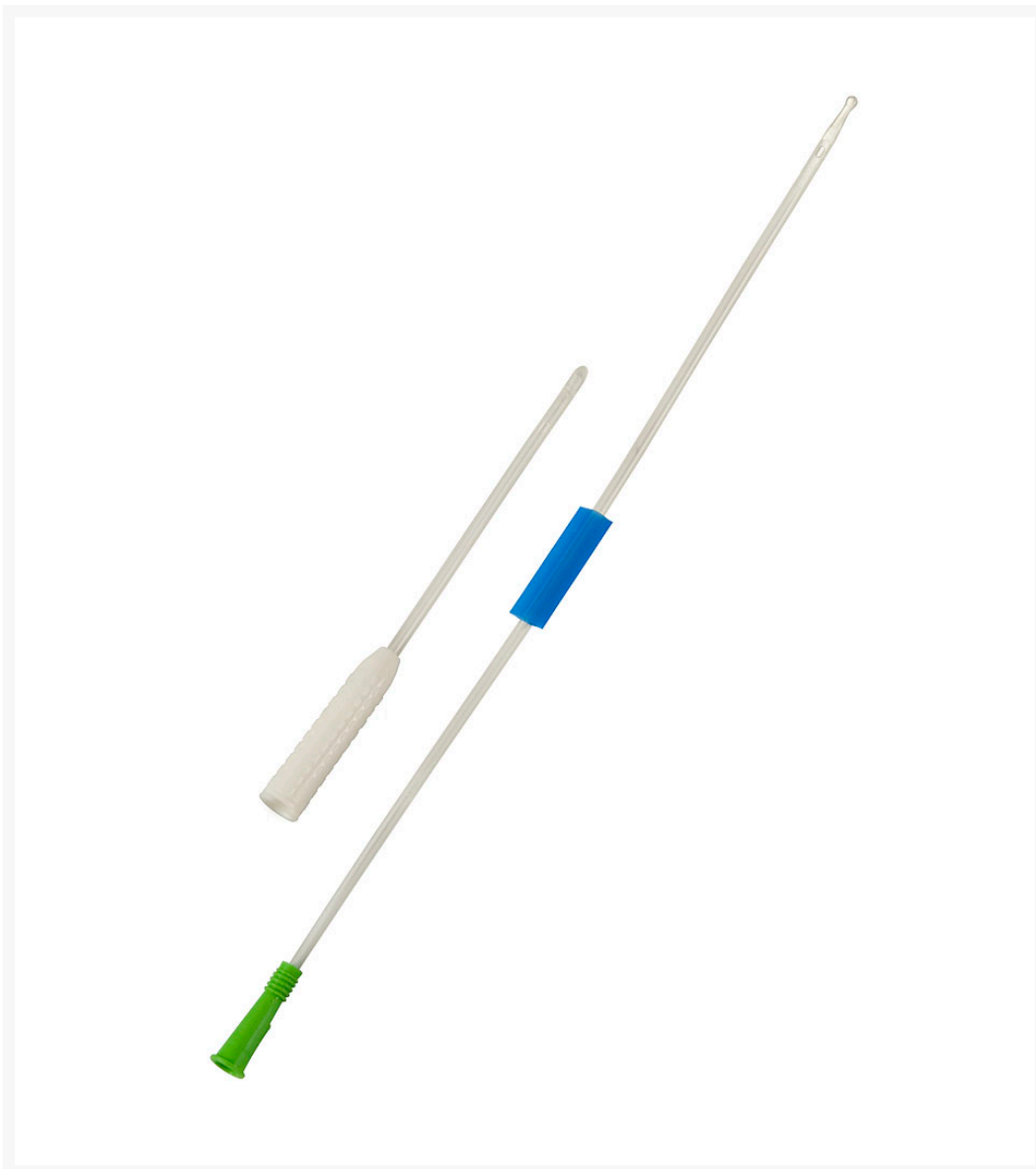

## Korte omschrijving

De Hekura gebruiksklare eenmalige katheter kan de oplossing bieden voor blaasproblemen en is beschikbaar

voor zowel mannen als vrouwen. Heeft jouw cliënt een verminderde handfunctie waardoor het openen van een verpakking lastig is? Geen probleem! Door het grote oog aan de bovenzijde van de pouch is de verpakking eenvoudig te openen, voor iedereen. Door een plakzijde aan de verpakking is de pouch eenvoudig op te hangen aan het badkamermeubel. Zo kan de katheter gemakkelijk ingebracht worden, en gebeurt het ook hygiënisch.

- Steriele gebruiksklare eenmalige katheter
- Bolvormige tip voor mannen
- Nelaton tip voor vrouwen
- No-touch inbrenghulp voor mannen
- Dikke connector voor een goede grip voor vrouwen
- TPU (thermoplastisch polyurethaan)
- Hydrofiele PVP-coating
- Gebruiksduur max. 1 keer

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op [hekura.nl/gebruiksklarekatheters](https://hekura.nl/gebruiksklarekatheters)

## Omschrijving

---

De gebruiksklare eenmalige katheter is voor het afvoeren van urine bij mannen en vrouwen. De steriele katheter is gemaakt van TPU (thermoplastisch polyurethaan) en heeft een geactiveerde hydrofiele PVP-coating (polyvinylpyrrolidon). Max. 1 keer gebruiken.

## Aditionele informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Referentienummer | 211  |
| Toepassing       | <p><b>Instructie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Was je handen goed met water en zeep.</li><li>• Open de verpakking aan de bovenkant en haal de beschermlaag van de plakker op de achterkant van de verpakking. Plak de katheter in zijn verpakking op een schoon en droog oppervlak.</li><li>• Reinig vóór het inbrengen van de katheter je handen en het gebied rondom de opening van de urinebuis goed.</li><li>• Breng de katheter voorzichtig in de urinebuis in en ga door met opschuiven van de katheter in de urinebuis totdat de urine begint te stromen.</li><li>• Als er geen urine meer uitstroomt, trek je de katheter voorzichtig terug. Ga door tot de blaas leeg is, dan verwijder je de katheter helemaal.</li><li>• Gooi de katheter op de juiste manier weg.</li></ul> <p>Bekijk de volledige instructievideo's op <a href="https://hekura.nl/gebruiksklarekatheters">hekura.nl/gebruiksklarekatheters</a></p> |
| Merk             | Hekura   |

## Product opties

|            |                     |
|------------|---------------------|
| charriere: | UZ6408, 15 cm, CH08 |
|            | UZ6410, 15 cm, CH10 |
|            | UZ6412, 15 cm, CH12 |
|            | UZ6414, 15 cm, CH14 |
|            | UZ6416, 15 cm, CH16 |
|            | UZ6430, 40 cm, CH10 |
|            | UZ6432, 40 cm, CH12 |
|            | UZ6434, 40 cm, CH14 |
|            | UZ6436, 40 cm, CH16 |