

Heka blarenpleisters mix

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

De Heka blarenpleisters bieden directe verlichting*. De pleisters beschermen de huid tegen vocht, vuil en bacteriën en zorgen voor een snelle genezing van de blaar. Doordat de blarenpleister werkt als een tweede huid kan het blaren voorkomen en vermindert het de pijnlijke druk bij een blaar. Het creëert een optimale omgeving voor herstel van de huid en maakt het dragen zeer comfortabel. De Heka blarenpleisters blijven

goed zitten.

*Pijnverlichting als gevolg van demping/vermindering van wrijving.

Omschrijving

De Heka blarenpleisters bieden directe verlichting*. De pleisters beschermen de huid tegen vocht, vuil en bacteriën en zorgen voor een snelle genezing van de blaar. Doordat de blarenpleister werkt als een tweede huid kan het blaren voorkomen en vermindert het de pijnlijke druk bij een blaar. Het creëert een optimale omgeving voor herstel van de huid en maakt het dragen zeer comfortabel. De Heka blarenpleisters blijven goed zitten.

*Pijnverlichting als gevolg van demping/vermindering van wrijving.

Aditionele informatie

Artikelnummer	OT0181
Referentienummer	56781
Toepassing	GEBRUIK • Voor gebruik de huid goed reinigen en drogen. • Breng de blarenpleister aan over de blaar zonder het plakende gedeelte van de pleister aan te raken. • De pleister kan blijven zitten totdat deze vanzelf loslaat. • Druk de randen goed aan voor optimale bescherming. • Vervang de pleister na maximaal 7 dagen. • Verwijderen: til een hoekje van de pleister op en rol de pleister voorzichtig van de huid.
Maat	Attends Soft 3 Extra (208250)
Merk	Heka
Afmeting	OT0181, mix
Inhoud verpakking	6 x 6 stuks
Inhoud overdoos	50 x 6 x 6 stuks
ZI-nummer	17154219
CNK code	4501805