

Heka likdoornpleisters

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

De Heka likdoornpleisters bieden directe pijnverlichting*. De pleisters beschermen de huid tegen vocht, vuil en bacteriën en verbetert de hydratatie van de huid. Doordat de likdoornpleister de likdoorn hydrateert en zachter maakt wordt het eenvoudiger om deze te verwijderen. Het creëert een optimale omgeving voor herstel van de likdoorn en maakt het dragen zeer comfortabel. De Heka likdoornpleisters blijven goed zitten.

*Pijnverlichting als gevolg van demping/vermindering van wrijving.

Omschrijving

De Heka likdoornpleisters bieden directe pijnverlichting*. De pleisters beschermen de huid tegen vocht, vuil

en bacteriën en verbetert de hydratatie van de huid. Doordat de likdoornpleister de likdoorn hydrateert en zachter maakt wordt het eenvoudiger om deze te verwijderen. Het creëert een optimale omgeving voor herstel van de likdoorn en maakt het dragen zeer comfortabel. De Heka likdoornpleisters blijven goed zitten.

*Pijnverlichting als gevolg van demping/vermindering van wrijving.

Aditionele informatie

Referentienummer	214
Toepassing	GEBRUIK: • Voor gebruik de huid goed reinigen en drogen. • Zorg ervoor dat de huid vrij is van crème en oliën. • Brengt de pleister aan zonder het plakkende gedeelte van de pleister aan te raken. • Druk de randen stevig aan voor optimale bescherming. • Verwijder het papier aan de bovenzijde van de pleister. • De pleister kan blijven zitten totdat deze vanzelf loslaat. • Vervang de pleister na maximaal 7 dagen. • Verwijderen: til een hoekje van de pleister op en rol de pleister voorzichtig van de huid.
Maat	3 (205945)
Merk	Heka

Product opties

Hekasize:	OT0198, likdoorn 20 x 60 mm
-----------	-----------------------------