

# Attends Contours (Regular & -Air Comfort) | Protocol d'utilisation BE-FR

## Product afbeeldingen



Incontinence protection for you




## CONTOURS

Attends Contours zijn anatomisch gevormde inleggers voor matige tot zware urine- en/of ontlastingsincontinentie. Te dragen met een fixatiebroekje (Contours 6-10). Contours 4-5 kunnen gedragen worden in nauwsluitend ondergoed.

### Gebbruiksaanwijzing

Voor de beste pasvorm raden we aan om Attends fixatiebroekjes (Attends Stretch Pants Regular, Attends Stretch Pants of Attends Stretch Pants Comfort) te gebruiken in combinatie met Attends Contours Regular en Attends Contours Air Comfort.



**1** Meet de omvang van heup en taille en kies de grootste omtrek van deze twee om de juiste maat fixatiebroekje te bepalen.



**2** Trek het fixatiebroekje aan tot net boven de knie en vouw de tailleband om. Vouw de inlegger volledig open en zorg dat de zachte absorberende laag aan de bovenkant zit. Vouw de inlegger in de lengte voorzichtig tot een bootvorm, zodat dat de antilekrandjes rechtop staan.



**3** Plaats de inlegger tussen de dijen van voor naar achter - met het bredere uiteinde aan de achterzijde van het lichaam.



**4** Strijk de inlegger glad en trek het fixatiebroekje omhoog tot in het kruis voor een goede aansluiting en pasvorm.



**5** Het broekje moet de inlegger volledig bedekken. Zorg dat de inlegger goed aansluit op het lichaam en nergens dubbel gevouwen is.



**6** Het broekje moet de inlegger volledig bedekken. Controleer tot slot of zowel de inlegger als het fixatiebroekje comfortabel en goed zitten.

Voor meer informatie bezoek [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [www.attends.be](http://www.attends.be)

Attends Contours Gebbruiksaanwijzing NL-BE 124117 04 2024

## Korte omschrijving

---

Maximaal 1 stuk per bestelling.

## Aditionele informatie

---

Referentienummer	52417-1
Merk	Attends
Soort	Diversen