

Attends Cover-dri | Gebruiksaanwijzing NL-BE

Product afbeeldingen




Incontinence protection for you



COVER-DRI

Attends Cover-Dri beschermende onderleggers zijn speciaal ontworpen voor licht tot matig urineverlies. Ook geschikt voor klinische procedures waar niet-steriele onderleggers vereist zijn.

Gebruiksaanwijzing

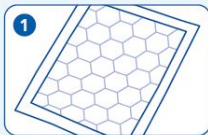

1

Vouw de onderlegger volledig open en zorg ervoor dat de waterdichte onderkant op het oppervlak ligt waarop u de persoon positioneert. De zachte, witte bovenlaag met absorberende kussentjes bevindt zich aan de bovenzijde.



2

Positioneer de persoon op de onderlegger.



3

Draai de persoon in zijligging en rol de gebruikte onderlegger in de richting van de rug van deze persoon.



4

Vouw de nieuwe onderlegger open en leg deze tegen de rug van de persoon.



5

Draai de persoon op de nieuwe onderlegger en zorg ervoor dat de onderlegger vlak blijft liggen. Verwijder het gebruikte product.



6

Draai de persoon weer in de aanvangspositie.

Voor meer informatie bezoek www.attends.nl of www.attends.be

Attends Cover-Dri Gebruiksaanwijzing NL-BE 154219 11/2024

Aditionele informatie

Referentienummer	56474NL-1
Merk	Attends
Soort	Diversen