

# Attends Cover-dri | Protocol d'Utilisation BE-FR

## Product afbeeldingen

**Attends**<sup>®</sup>  
La protection incontinence pour vous




## COVER-DRI

Attends Cover-Dri est une gamme d'alèses pour la protection des surfaces spécialement développée pour gérer l'incontinence urinaire légère à modérée et pour les examens médicaux où une absorption stérile n'est pas requise.



### Conseils de Pose

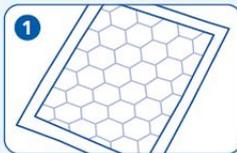

Ouvrez l'alèse entièrement en s'assurant que le voile extérieur imperméable discrètement coloré est positionné vers le bas. Le voile supérieur doux et blanc avec les coussinets doit se trouver en haut.



Placez la personne sur l'alèse.



Pour changer l'alèse Attends Cover-Dri, déplacez la personne couchée en position latérale et enrroulez la protection à remplacer vers le dos de la personne.



Déroulez une nouvelle alèse et placez-la vers le dos de la personne.



Retournez la personne de l'autre côté sur la nouvelle protection en veillant que la nouvelle alèse est posée bien plat sur le lit. Puis retirez l'ancien produit.



Tournez la personne de nouveau en position dorsale.

Pour plus d'informations visitez [www.attends.be](http://www.attends.be)

Attends Cover-Dri Webshop: 0204844444 BE FR 10475 - 11/2024

## Aditionele informatie

---

Referentienummer	56474FR-2
Merk	Attends
Soort	Diversen