

# Heka Dur 2 Zwachtelprotocol

## Product afbeeldingen



### Heka Dur 2 Zwachtelprotocol



**Stap 1** Breng het been en de voet in de juiste houding. De voet moet in een hoek van 90 graden staan met het onderbeen.



**Stap 2** Breng de eerste laag aan op de voet. Start bij de aanzet van de tenen. **LET OP! Zorg dat je de tenen niet mee zwachtelt.**



**Stap 3** Breng de zwachtel na twee fixeerrondes over de achterkant van de voet aan. Bedek de hiel door de zwachtel in achtvorm aan te brengen. Het is belangrijk om bij het gebied rond de enkel genoeg polstering aan te brengen. **LET OP! Rek de zwachtel niet uit tijdens het aanbrengen op de voet.**



**Stap 4** Breng de 1e laag aan in een spiraal rond het been. Begin boven de enkel van een overlap van 50%. De zwachtel moet vanaf deze stap volledig uitgerekt worden.



**Stap 5** Stop met zwachtelen wanneer je ongeveer twee vingers onder de knieholte bent. Scheur de overtlige zwachtel af.



**Stap 6** De overtlige zwachtel kan worden gebruikt voor extra polstering bij de rand waar de voet overgaat in het scheenbeen en bij de achillespees.



**Stap 7** Begin met het aanleggen van de 2e laag. Doe dit op dezelfde manier als bij de 1e laag. Tot op dit punt mag de indicator nog niet worden uitgerekt.



**Stap 8** Bedek de hiel door de zwachtel in achtvorm aan te brengen. Zorg ervoor dat je geen plooiën creëert.



**Stap 9** Breng de 2e laag aan in een spiraal rond het been. Begin boven de enkel met een overlap van 50%. Rek de zwachtel vanaf deze stap uit, totdat de indicator een vierkant laat zien met zijden van gelijke lengte.



**Stap 10** Stop met zwachtelen wanneer je ongeveer twee vingers onder de knieholte bent. Scheur de overtlige zwachtel af. Druk nu de zwachtel goed aan over het gehele been voor een optimale hechting.

83230 - 09-2024



**VAN HEEK MEDICAL**  
Onderdeel van Masdex Groep

Maarweg 16 | 5804 CL Venray | Nederland  
 Pilsenstraat 104 | 7900 Tumbout | België  
 T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com



## Korte omschrijving

Met het zwachtelprotocol van Heka Dur 2 bereik je altijd de juiste druk!

## Aditionele informatie

---

Artikelnummer	85230
Referentienummer	85230
Merk	Heka
Soort	Diversen