

CUREA P1 HEEL 20X30CM ST

Product afbeeldingen

Korte omschrijving

Curea P1 Heel is ideaal voor wondverzorging in het hielgebied. De speciale vorm maakt het ongecompliceerd aanbrengen van het verband op de voet mogelijk door middel van de vouwtechniek en vermindert het risico op lekkage door de ademende maar vloeistofdichte toplaag. Steriel, superabsorberend wondverband met cellulose kern en superabsorberende polymeren; matig/zeer sterk vochtafgevend en geïnfecteerde wonden. Reinigt wond, creëert goed wondmilieu, geurreductie. Ademende, vloeistofdichte achterkant die werkt als steriele barrière

Omschrijving

Curea P1 SuperCore Heel, superabsorberend wondverband; voor de behandeling van lichte tot zware exsuderende wonden. Het steriel wondverband bestaat uit een toplaag van polyurethaan, die van binnenuit ademt en van buitenaf water- en bacteriedicht is. Een kern van cellulose en superabsorberende polymeren, met een sterk absorptievermogen, dat de wond reinigt en een gebalanceerd wondklimaat creëert. Overtollig vocht wordt langzaam aan de wond onttrokken, waardoor de wond een langere rustfase krijgt om het natuurlijke genezingsproces te bevorderen. De combinatie van sterke en constante absorptiekracht, voorkomt maceratie en zorgt er voor dat het wondverband lang kan blijven zitten. Het geabsorbeerde vocht wordt samen met de bacteriën in de kern gebonden, waardoor geurvorming wordt tegen gegaan. Verder heeft het verband een wondcontactlaag van polypropyleen, die niet aan de huid verkleeft. Het verband is geschikt in combinatie met compressie en moet gefixeerd worden.

- superabsorberend wondverband
- polypropyleen wondcontactlaag
- kern van cellulose en superabsorberende polymeren
- polyurethaan toplaag
- Voor de hiel
- bedrukte achterkant voor minder risico op onjuiste toepassing
- steriel Toepassen voor:
 - ulcus cruris
 - decubitus
 - oncologische wond
 - diabetische voet
 - Licht

Aditionele informatie

Artikelnummer	57252
Referentienummer	P1H-200300-5
Toepassing	Was handen. Reinig wond en huid; droog huid. Neem verband uit verpakking. Breng verband met niet verklevende zijde op wond, zorg voor overlapping. Fixeer met windsel of fixatiepleister. Verband kan 7 dagen in situ blijven.
Inhoud verpakking	5 STUK
ZI-nummer	17403146