



Heka koud/warm kompressen

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Het Heka koud/warm kompres is speciaal ontworpen voor een warme en koude toepassing. Koud verlicht het de pijn bij zwellingen, kneuzingen en lichte ontstekingen aan spieren of gewrichten. Indien warm gemaakt

verlicht het spierpijn, krampen, menstruatiepijn, nek- en rugklachten. Het kompres kan hergebruikt worden.

- Herbruikbaar
- Te gebruiken voor warme en koude toepassing
- Inclusief handige non-woven hoes

Omschrijving

Het Heka koud/warm kompres is speciaal ontworpen voor een warme en koude toepassing. Koud verlicht het de pijn bij zwellingen, kneuzingen en lichte ontstekingen aan spieren of gewrichten. Indien warm gemaakt verlicht het spierpijn, krampen, menstruatiepijn, nek- en rugklachten. Het kompres kan hergebruikt worden.

- Herbruikbaar
- Te gebruiken voor warme en koude toepassing
- Inclusief handige non-woven hoes

Aditionele informatie

Referentienummer	35
Toepassing	<p>Voor pijnverlichting bij o.a. zwellingen, spierpijn en nek- en rugklachten.</p> <p>GEBRUIK BIJ KOUDE TOEPASSING</p> <ul style="list-style-type: none">• Het kompres 2 uur in de vriezer leggen.• Haal het kompres uit het vriesvak en schuif het in de bijgeleverde hoes of een dunne doek.• Leg het kompres (maximaal 20 minuten) op het pijnlijke lichaamsdeel. <p>GEBRUIK BIJ WARME TOEPASSING</p> <p>In water:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leg het kompres ca. 5 minuten in heet water met een temperatuur van maximaal 80 °C.• Verdeel de gel gelijkmatig over het kompres.• Haal het kompres uit het water, droog af en plaats in de bijgeleverde hoes of dunne doek.• Leg het kompres (maximaal 20 minuten) op het pijnlijke lichaamsdeel. <p>In magnetron:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stel de magnetron in op ontdooistand (maximaal 600W).• Verdeel de gel gelijkmatig over het kompres en plaats het kompres 55 seconden in de magnetron. Blijf tijdens het opwarmen bij de magnetron. Zodra het kompres begint op te zwellen de magnetron direct uitschakelen!• Haal het kompres uit de magnetron en schuif het in de bijgeleverde hoes of een dunne doek.• Leg het kompres (maximaal 20 minuten) op het pijnlijke lichaamsdeel. <p>LET OP! Leg het kompres nooit direct op de huid. Dit kan bevriezing/verbranding veroorzaken.</p>
Merk	Heka

Product opties

Afmeting:	OT0300-2, 13 x 14 cm
	OT0310-2, 12 x 29 cm

